




數字型電子體溫計 機型:T 102

产品部件描述

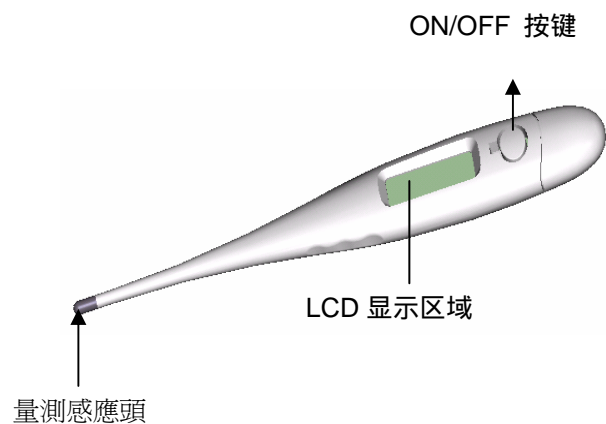

恭喜您惠購本電子體溫計！為了正確地使用本產品，第一次使用之前建議先熟悉此操作說明書，並保存在一個安全的地方，將來作為參考。

重要安全指令

- 此溫度計只適合人體體溫的測量！
- 測量時聽到發出嗶嗶聲響後為最小量測時間！
- 本溫度計含有小零件(如電池等) 有可能被孩子吞下，所以小孩使用時大人必須陪同，且將其放在小孩子不能接觸到的地方。
- 保護本溫度計免受強力撞擊或高空摔落！
- 避免環溫超過 60°C。不要在開水中蒸煮本體溫計！
- 只能使用《清洗和消毒》節中列出的商業消毒劑清洗本體溫計，溫度計浸於清洗液之前必須是沒有被拆封過的。

注意：溫度計包含一個長壽命使用電池。被更換時，請依照當地環保法規

作為特別廢品處理。

· 到製造商推薦的被授權的實驗室校正準確度，每兩年一次。

調試體溫計

按 ON/OFF 按鍵打開溫度計後，開始顯示檢測，然後顯示之前最後測量之數值兩秒鐘；再接下來電路檢測。如環溫低於 32°C，顯示“L”，右上角的“°C”閃動。體溫計已準備好開始量測。

功能測試

每次一開機，體溫計自動進行正常功能測試。如一測到錯誤功能(測量不正確)，顯示“Err”，且不能得到任何讀數，如發生上述情況，請更換該體溫計。

低電壓顯示

當出現《□》符號，表示電池被用完。當顯示標誌《□》，讀數可能不準確，請立刻更換電池。請打開電池蓋，更換已使用完的電池。

開始量測

測量期間，被測當前溫度不斷變化且連續顯示，°C符號一直閃動。如果發出嗶嗶聲響達十次且°C符號停閃動，這意味測溫數值已確定且測量已完成。

為了延長電池使用壽命，用完後請關機。否則，溫度計約十分鐘後自動地關閉。

儲存測量讀數

本體溫計自動保存最後一次測量的數值。一開機，顯示檢測後馬上自動顯示最後一次測量數值。

測量方法

口溫測量

將體溫計置於舌根下兩軟骨中的一邊。量測感應頭必須跟軟體組織接觸良好。緊閉嘴唇，用鼻子均勻呼吸以免影響測量結果。

大致測量時間：一分鐘

肛溫測量

肛溫測量是最可靠的測量方法，特別適合嬰幼兒。小心將量測頭插進直腸內 2~3cm。

大致測量時間：一分鐘

腋溫測量

從醫學角度上講，腋溫測量數值最不準確。如果要求量測結果準確，建議不要使用這種方法。

大致測量時間：五至十分鐘

清洗和消毒

本體溫計 100%防水。可以用肥皂水或溫水清洗或用沾有 70%醫學酒精的布擦洗。

不要在沸水中或洗碗機裏清洗，否則會損壞體溫計。此不正當操作所造成的損壞不在產品保修範圍內。

技術規格

類別	絕大部份體溫計
測量範圍	32.0°C ~42.9°C 溫度 < 32.0°C: 顯示 "L" (低溫) 溫度 > 42.9°C: 顯示 "H" (高溫)
精確度	精確至 0.1°C
準確度	測量範圍在 32°C ~42.9°C 之間準確度偏差為 ±0.1°C 在其他測量範圍準確度偏差為 ±0.2°C
測量反應時間 (在水槽)	在測溫範圍 23±2°C → 37±2°C 之間反應時間在 40 秒以內

測量時間	測口溫: 60 ±10 秒 測腋溫: 100±20 秒 (以上僅供參考, 測量時間會因被測量的人不同而不同)
電源	一粒 1.5V 按鈕電池
電源消耗	測試模式中最大消耗 0.15 毫瓦
嗶嗶響功能	發出嗶嗶響聲代表準備好測試或測試已完成
記憶功能	動用體溫計, 顯示檢測後自動顯示最後一次測量數位兩秒鐘
自動斷電功能	測量完成後大概 8 分鐘 40 秒 (± 1 分鐘) 自動斷電
低電顯示	當顯示標誌 <input type="checkbox"/> , 讀數可能不準確, 請立刻更換電池。
防水功能	整支體溫計防水
操作溫度	10~40°C, 15~95% 濕度
儲存溫度	-20°C 至 +60°C
自我檢測功能	一開機自我檢測功能自動啟動。當系統發生錯誤顯示 "Err"
參考標準	EN12470-3: 2000, 臨床體溫計 ASTM E1112- 00 標準

保修

本公司提供產品一年免費保修服務。任何不正當使用造成損壞不在保修範圍。電池和包裝材料同樣不在受保修之列。任何其他的人為損壞也不在保修範圍。申請保修時須出具購買收據。

中國公司：愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司
售後服務：8008309390

授權生產：東莞市黃江百綠電子廠
東莞市黃江鎮北岸工業區
生產企業許可證號：粵藥管械生產許 20010325 號
粵食藥管械(准)字 2005 第 2200161 號
產品標準號：YZB/粵 0064-2005