



電子體溫計

型號：DT-12A(T108)

(女性專用，四位顯示)

操作說明書

電子體溫計能快速準確地測量人體溫度，與傳統的水銀玻璃棒體溫計相比，具有讀數方便、測量時間短、測量精度高、能記憶並有蜂鳴提示等優點，尤其是電子體溫計不含水銀，對人體及周圍環境無害，特別適合於家庭使用。

技術參數

操作環境：(5~35)°C, ≤80% RH

測量範圍：32.00°C~42.00°C

(當溫度超出此範圍時，顯示Lo或Hi)

測量誤差：±0.1°C(32.50°C~42.00°C)

分辨率：0.01°C

功耗：工作狀態下0.15mW

電池：LR/SR-41型1.5V紐扣電池

電池壽命：連續工作約100小時

外形尺寸：134X23X15mm(帶透明外殼)

淨重：約12克

蜂鳴提示：測量結束後發出蜂鳴提示聲

防水性：防水型具有全防水功能

貯運條件：包裝後貯存在環境條件(-25~55)°C, ≤95% RH、

無腐蝕性氣體和通風良好的室內。

生理效應：本產品在使用過程中，對人體無毒、無刺激、無致敏等不良反應。

電氣安全分類為B型設備

注：如因規格或外觀之改良而有變更時，恕不預告

使用方法



(圖 A)

1. 體溫計使用前，應先用酒精對體溫計頭部進行消毒。

2. 按壓開關，蜂鳴器馬上發出蜂鳴音，顯示屏如圖A所示，時間約2秒鐘。

3. 當顯示屏中的“℃”符號閃爍時，表示體溫計已處於待測狀態。

4. 將體溫計用來量體溫。量體溫時顯示出的溫度值逐漸上升，同時“℃”符號不斷閃爍。

5. 當“℃”符號停止閃爍，同時體溫計發出約5秒鐘的蜂鳴提示聲，這時體溫計測量完畢，可以讀取顯示出的體溫值。


注：“℃”符號閃爍停止後，如果體溫計依然與被測部位相接觸，溫度值很有可能還在上升。建議在蜂鳴提示以後，盡可能再多測量一些時間。

6. 體溫計具有自動關機功能，將在測量結束後10分鐘內自動關機。但為長電池壽命，建議使用者在測量結束後，按壓電源鍵關閉電源。

體溫測量方法

測量體溫時，請保持在同一部位進行一定時間的測量。

* 口腔測量法：測量前，請不要喝熱或冷的飲料，嘴巴閉上5分鐘左右，再把體溫計的感溫頭置於舌下內側根部，和舌頭密接後，緊閉嘴巴，測量時間約1分鐘。

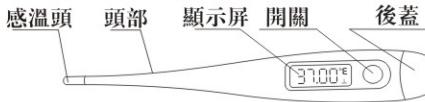* 腋下測量法：測量之前，先把腋下的汗擦干，腋窩緊閉5分鐘左右，再把體溫計的感溫頭由下往上緊頂在腋窩處，交叉雙臂，使它緊緊密接。測量時間約2分鐘左右。
(建議將測量結果加0.5°C)* 直腸測量法：將體溫計感溫頭輕輕插入肛門約13mm(1/2英寸)。測量時間約40秒。
(建議將測量結果減0.5°C)

記憶溫度

* 使體溫計處於關機狀態，然後按住開關鍵不放，約2秒鐘後，顯示屏會顯示上次測量溫度。

* 或開機後，體溫計顯示如圖A後，將顯示上次測量溫度約2秒。

注意事項

* 請勿摔打和彎曲體溫計

* 除防水型的以外，請勿將體溫計浸沒於水中，體溫計的液晶顯示屏和電池蓋部分是不防水的。

* 體溫計的消毒應採用醫用酒精，不能用高溫消毒。

* 請勿讓體溫計接觸化學溶劑或稀釋劑。

* 請勿讓陽光直射體溫計。

* 除了更換電池，請勿拆卸體溫計。

* 安全性檢查：按下開關，體溫計發出蜂鳴音，同時顯示屏顯示如圖A則表示正常，否則為不正常。

* 保養：每次使用完畢，請將體溫計擦拭乾淨放入透明外殼中，待下次使用。

更換電池

1. 當體溫計顯示屏右下角顯示“+”或“-”符號，需更換體溫計電池。

2. 按B圖所示，打開電池蓋用鑷子按C圖所示將電池取出。

3. 換上一個LR/SR-41型1.5V普通紐扣電池。


4. 如體溫計長期不用，請將電池取出。

注意：裝電池時請留心電池的電極(“+”向下，“-”向上)


切記：吞食電池會有生命危險！勿將電池投入火中，否則會引起爆炸。請將電池放於兒童不能拿到的地方。

如果吞食了電池，應立即往醫生處要求診治。

(圖 B)

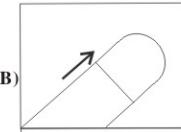

(圖 C)

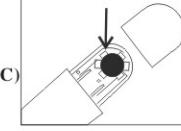

品質保證

1. 在用戶按本技術使用說明書正確使用體溫計的前提下，本產品自購買之日起一年內免費保修。

2. 我方對因下列使用者個人的原因而造成的故障將不提供免費保修服務。如：

a) 擅自拆裝、改裝該產品而造成的故障；

b) 在使用、搬運的過程中不慎摔打、跌落而造成的故障；

c) 因缺乏合理的保養而造成的故障；

d) 沒有按使用說明書的正確指示進行操作而造成的故障；

e) 因非我司授權的維修店的不當修理而造成的故障等等。

3. 在要求提供免費保修服務時，您必須持填有購買日期和購買店印章的單據。請務必在購買本產品時要求店員開據此單據並加蓋店章。

4. 保修範圍外的修理服務，將按規定收費。

5. 在要求提供保修服務時，請攜帶本品。



為保護環境，請根據國家或當地相關法律規定將廢電池送至合適的回收點

中國公司：愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司

客戶服務免費熱線：800-830-9390

授權生產：杭州華安醫療保健用品有限公司

生產地址：杭州市余杭區閒林鎮五常經濟開發區白廟工業園2幢

生產企業許可證號：浙食藥監械生產許20050065號

註冊號：浙食藥監械(準)字2008第2200099號

產品標準號：YZB/浙 0137-2008